

Remote

GEBRUIKSAANWIJZING



2 | Inleiding

Inleiding

Starkey Hearing Technologies Remote maakt het gemakkelijk om de instellingen van uw hoortoestellen discreet te wijzigen.

Dankzij de batterijen die lang meegaan, is de Remote altijd klaar voor gebruik.



- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Schakelaar om oor te selecteren | 5. Programmakeuze |
| 2. Volume omhoog | 6. Favoriet |
| 3. Volume omlaag | 7. Home |
| 4. Stil/Geluid | 8. Vergrendelen/
Ontgrendelen |

Instructies voor koppeling

Om interactie tussen Starkey Hearing Technologies Remote en uw hoortoestel(len) mogelijk te maken, moet u de Remote eerst met elk hoortoestel koppelen. Deze koppeling hoeft u slechts één keer uit te voeren, aangezien de apparaten elkaar hierna automatisch herkennen wanneer ze ingeschakeld zijn en zich binnen het draadloze bereik van elkaar bevinden.

U kunt de Remote koppelen met een enkel hoortoestel of met een set van twee hoortoestellen.

Om de Remote in gebruik te nemen:

1. Schuif de onderste schakelaar van de positie voor Vergrendelen (rechts) naar Ontgrendelen (links). 
2. Schakel uw hoortoestellen uit, schakel ze vervolgens opnieuw in en plaats ze binnen 30 cm van de Remote.
 - **Let op:** Voor een systeem met CROS hoortoestel, moet u zowel het hoortoestel als de CROS zender uitschakelen. Schakel alleen het hoortoestel opnieuw in en zorg ervoor dat de CROS zender uit blijft staan.

3. Druk op de HOME knop en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt.



4. Na 5 seconden beginnen beide LED-lampjes snel te knipperen.



5. Voor **meerdere** hoortoestellen:

- Wanneer de linker LED meer dan 2 seconden constant blauw gloeit en de rechter LED meer dan 2 seconden rood gloeit, is het koppelen gelukt. Zo niet, herhaal stap 2 – 5.

Voor **één linker** hoortoestel:

- Wanneer de linker LED meer dan 2 seconden constant blauw gloeit, is het koppelen gelukt. Zo niet, herhaal stap 2 – 5.

Voor **één rechter** hoortoestel:

- Wanneer de rechter LED meer dan 2 seconden constant rood gloeit, is het koppelen gelukt. Zo niet, herhaal stap 2 – 5.

6. Om de installatie te controleren kunt u de knop voor Volume Omhoog of Volume Omlaag indrukken. Dit zou moeten leiden tot een gewijzigd volume.



Schakelaar om oor te selecteren



De schakelaar voor het selecteren van een oor, bepaalt of de wijzigingen op één hoortoestel of op beide hoortoestellen worden doorgevoerd.

Voor een set van twee hoortoestellen: om voor beide hoortoestellen tegelijk aanpassingen te doen, zet u de schuif in het midden.

Voor één hoortoestel: de positie van de schakelaar wordt genegeerd, aangezien de Starkey Hearing Technologies Remote altijd de juiste opdracht voor het linker of rechter hoortoestel verstuurt.

LED



De blauwe LED knippert wanneer er door het drukken op een knop een opdracht naar het linker hoortoestel wordt verstuurd. Zo knippert de rode LED voor het rechter hoortoestel. Rood staat voor Rechts.

Volume omhoog/omlaag



Kort indrukken: het totale volume van alle geluiden die via de microfoon van uw hoortoestel binnenkomen, wordt in de gekozen richting aangepast (verhoogd of verlaagd).

Lang indrukken: wanneer u audio streamt via een Starkey Hearing Technologies accessoire, wordt het volume van de audio stream in de gekozen richting aangepast (verhoogd of verlaagd).

Home



Druk op de Home knop om uw hoortoestellen naar programma één en het standaard volume terug te schakelen.

Vergrendelen/Ontgrendelen



Om de instellingen van uw hoortoestellen te kunnen wijzigen, moet de Starkey Hearing Technologies Remote in de ontgrendelde stand staan. Wanneer u de Remote niet gebruikt, kunt u het accessoire

vergendelen om te voorkomen dat u onbedoeld instellingen wijzigt. Ook zorgt dit voor een langere batterijduur.

Stil/Geluid



Druk op de Stil/Geluid knop om het geluid dat via de microfoon van uw hoortoestel binnenkomt tijdelijk te dempen. Druk nog een keer op de knop om het geluid van de hoortoestellen weer te activeren.

LET OP: Wanneer het geluid van de hoortoestellen is gedempt, zorgt het indrukken van een andere knop ervoor dat naast de functie van de betreffende knop, het geluid van de hoortoestellen opnieuw wordt geactiveerd.

Programmakeuze



Uw audicien kan op uw hoortoestel meerdere programma's instellen. U kunt naar deze aanvullende programma's schakelen door op de knop voor Programmakeuze te drukken. Hiermee worden de beschikbare programma's één voor één doorgelopen.

Favoriet



De knop Favoriet van uw hoortoestellen is op de volgende wijze geprogrammeerd:

- **Geen** – Het indrukken van deze knop heeft geen effect op de hoortoestellen.
- **Audio-streaming stoppen/starten** – Het indrukken van de knop start (of stopt) het streamen van audio via een Starkey Hearing Technologies accessoire.
- **Comfort Boost** – Het indrukken van de knop onderdrukt ruis en optimaliseert de geluidskwaliteit in rumoerige omgevingen. Wanneer er nogmaals op de knop wordt gedrukt, wordt de functie weer uitgeschakeld.
- **Spring naar programma 4** – Door het indrukken van de knop, schakelt het hoortoestel naar programma vier.
- **Tinnitus Stimulus Aan/Uit** — Door het indrukken van de knop wordt er een tinnitus stimulus via de hoortoestellen afgespeeld (of wordt het afspelen gestopt).

LET OP: Een aantal van deze functies is mogelijk niet op alle hoortoestellen beschikbaar.

Veiligheidskoord (optioneel)

1. Steek het dunne koord door het oogje in de behuizing van de Starkey Hearing Technologies Remote zodat het lusje er doorheen steekt.
2. Steek het veiligheidskoord door het lusje en trek eraan om de lus te sluiten.

LET OP: Veiligheidskoorden (artikel #90974-000) zijn verkrijgbaar via uw audicien.



Problemen oplossen

PROBLEEM	MOGELIJKE OOR- ZAAK	OPLOSSINGEN
LED's lichten niet op bij het indrukken van een knop.	De Starkey Hearing Technologies Remote staat in de vergrendelde stand.	Schuif de onderste schakelaar van de positie voor Vergrendelen (rechts) naar Ontgrendelen (links).
LED's lichten op, maar de hoortoestellen reageren niet bij het indrukken van een knop.	Nadat de onderste schakelaar in de Ontgrendelde stand is gezet, kan het even duren voordat de hoortoestellen draadloos worden 'gevonden'.	Wacht na het ontgrendelen ongeveer een seconde voordat u een knop indrukt.
	Hoortoestellen en Remote zijn niet gekoppeld.	Volg de instructies om uw hoortoestellen en de Remote te koppelen.
	Batterij van het hoortoestel is bijna leeg en levert onvoldoende stroom voor een draadloze verbinding.	Plaats een nieuwe batterij in het hoortoestel.
Het lukt niet om een set van twee hoortoestellen met de Remote te verbinden.	Tijdens het koppelen werden er minder dan twee hoortoestellen gevonden.	Zorg ervoor dat beide hoortoestellen beschikbaar zijn tijdens het koppelen.
Slechts één hoortoestel ontvangt de opdrachten.	De schakelaar voor het selecteren van een oor staat in de linker of rechter positie.	Schuif de schakelaar in de middelste positie om beide hoortoestellen te bedienen.

Bescherm uw hoortoestel tegen vocht, water, hitte en mechanische krachten, zoals stootkrachten. Let u ook op verontreinigingen tijdens het gebruik van haarlak. Stel uw Starkey Hearing Technologies Remote in geen geval bloot aan hitte of electromagnetische straling van welke aard dan ook (bijvoorbeeld röntgenstraling). Dit kan de werking negatief beïnvloeden. Bij het gebruik van mobiele telefoons of radiobestuurde apparaten in de buurt van zendmasten kan het tot storingen leiden.

Gebruik voor in het vliegtuig

Het Remote accessoire mag niet gebruikt worden tijdens de vlucht, tenzij dit door het vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk wordt toegestaan.

Internationaal gebruik

Uw Starkey Hearing Technologies Remote en zijn draadloze overdracht zijn specifiek voor een land, waar ook een licentie voor is. Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan bij internationale reizen mogelijk problemen geven, zoals storingen met andere elektronische apparaten of storingen in de Remote afstandsbediening zelf.

Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplantiseerd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico's vooraf uit te sluiten.

Belangrijk: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor optredende onderbrekingen door radio of Tv signalen, die door ongeautoriseerde modificatie van het apparaat optreden.

De Starkey Hearing Technologies Remote wordt ontwikkeld onder toezicht van de gezette richtlijnen en correspondeert met de Directive 1999/5/EC.

Paradigm, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN USA



Paradigm, Inc. European Headquarters
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom



Fabrikant

Starkey Laboratories
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

www.starkey.nl
www.starkey.be

Starkey Nederland en België

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7325 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@kindhoren.nl

